



Schnellstart Anleitung Jelly Bean Schalter

Care Call Mini Sender mit Netzteil




Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Jelly Bean Schalter Aktivierung

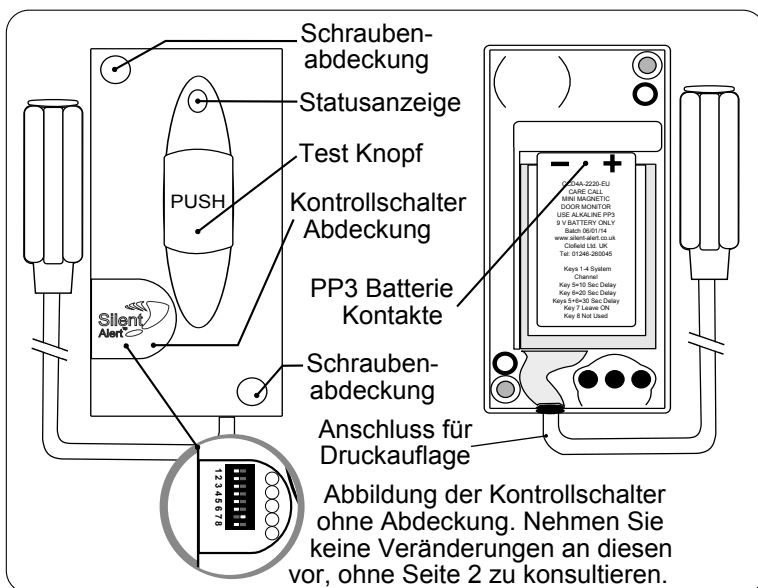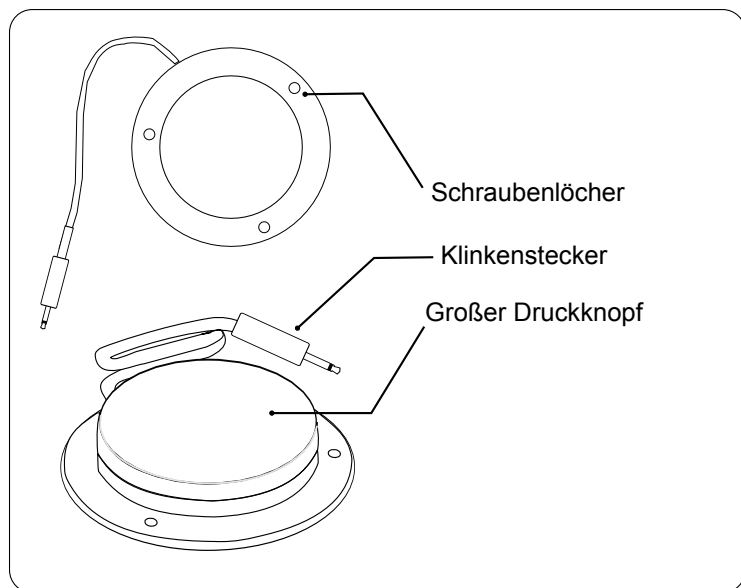

- 2.** Legen Sie eine 9 Volt PP3 Alkali Batterie oder eine Lithium Batterie ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität.

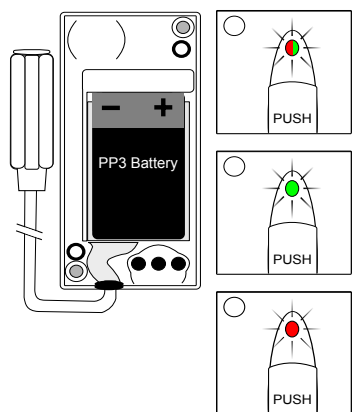

Wenn die Batterie das erste Mal eingelegt wird, blinkt die Statusanzeige einige Male zunächst rot, dann grün.

Daraufhin wird die Anzeige sooft grün blinken, wie die vorhandene Batterie Volt hat.


9mal blinken = 9 Volt in der Batterie

Falls die Statusanzeige zu diesem Zeitpunkt rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie leer ist und ausgetauscht werden muss.


Um den Batterietest zu wiederholen, entfernen Sie die Batterie, drücken Sie den Test Knopf, dann legen Sie die Batterie wieder ein um die Abfolge noch einmal zu sehen.

- 3.** Der Melder wird durch den Jelly Bean Schalter ausgelöst.

Stecken Sie den Stecker des Jelly Bean Schalters in die Anschlussstelle am Melder.

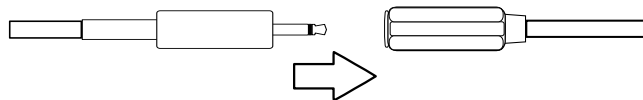


Falls nötig kann diese Verbindung auch zur Sicherheit mit Klebeband umwickelt werden.

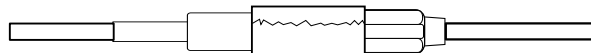

Beim ersten Mal, wenn die Verbindung besteht, kann es sein, dass der Alarm ausgelöst wird. Das ist normal.


- 4.** Platzieren Sie den Jelly Bean Schalter auf einem Nachttisch oder einer ähnlichen, ebenen und stabilen Oberfläche.

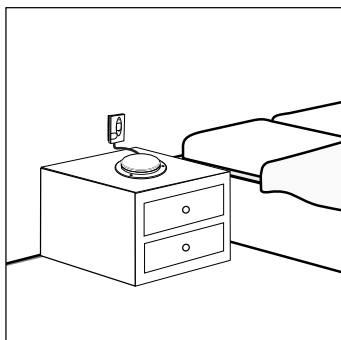

WARNUNG

Achten Sie beim Aufbau darauf, dass das Kabel nicht eine Stolperfalle bildet.

- 5.** Alternativ kann der Schalter auch an der Wand angebracht werden, indem man die Schraublöcher an der Basis des Schalters benutzt.

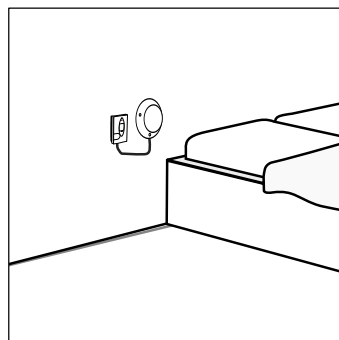

Weiterführende Einstellungen Jelly Bean Schalter Care Call Mini Sender mit Netzteil



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007


Einstellung der Zone

Der Sender ist automatisch so eingestellt, dass Zone 1 am Pager oder SignWave aufleuchtet.

1.


Um die Zone zu verändern, müssen Sie den Sender neu starten. Dazu entfernen Sie bitte die Batterie, drücken den Test Knopf und legen die Batterie wieder ein.

2.

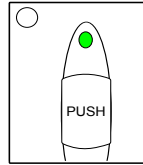


Nach der anfänglichen Abfolge von rot/grün blinken, leuchtet die Statusanzeige konstant grün.

3.

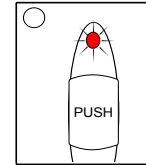


Drücken Sie den Test Knopf und lassen Sie ihn wieder los, während das Licht grün leuchtet. Das Licht blinkt erst einmal, dann zweimal, dann dreimal rot und so weiter bis 12.

4.

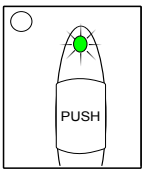

Um die neue Zone einzustellen, drücken Sie bitte dann den Test Knopf wenn die gewünschte Anzahl an Aufblinken erreicht ist. Die Statusanzeige leuchtet grün um die Auswahl zu bestätigen.

5.

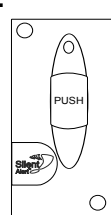

Im Folgenden zeigt der Sender den Batteriestand über die entsprechende Abfolge an, indem er sooft blinkt wie die Batterie Volt hat und startet dann ganz normal. Drücken Sie den Test Knopf um sich die ausgewählte Zone bestätigen zu lassen.

So wechseln Sie den Kanal

Anmerkung: In den meisten Fällen ist es nicht nötig den Kanal zu wechseln. Wenn allerdings ein oder mehrere weitere Care Call Systeme in der Nähe sind, ist es möglich den Kanal (bis zu 16 versch. Kanäle) zu wechseln um Störungen zu verhindern.

Der Sender hat den Kanal 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt. Falls Sie den Melder jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

Die Kanäle können mit den Schaltern 1-4 eingestellt werden.

Die Abbildung zeigt die 16 möglichen Kombinationen.

Stellen Sie sicher dass am Empfänger (Pager oder SignWave) und anderen Sendern des Systems der gleiche Kanal eingestellt ist.

