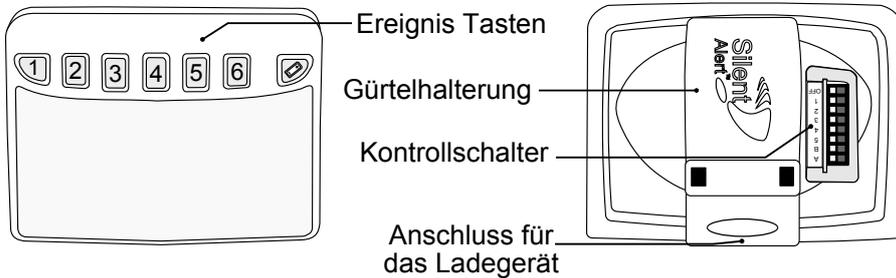


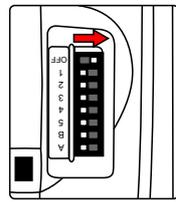
Schnellstart Anleitung CCP3A-2217-EU

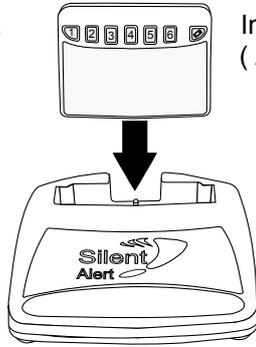
Care Call Pager

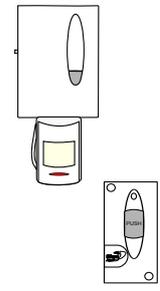


Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

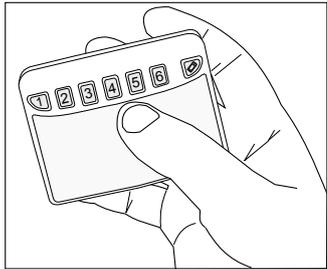


1.  Bewegen Sie den An/Aus Schalter auf An (nach rechts, weg von Aus).
Der Pager wird zuerst jede Taste aufleuchten lassen und danach vibrieren. Jetzt ist der Pager bereit zum Gebrauch.

2.  Installieren Sie den Wecker oder den Schnellader (Artikelnr. CH3-2205-IN, TR3A-2206-EU). Stellen Sie den Pager in den dafür vorgesehenen Ladeschacht und laden Sie den Pager für 24 Stunden. Die Batterie Taste wird daraufhin kurz grün aufleuchten um zu signalisieren dass der Pager in der korrekten Ladeposition ist. Falls eine vibrierende Kissenunterlage angeschlossen ist, wird der Pager 3mal vibrieren.

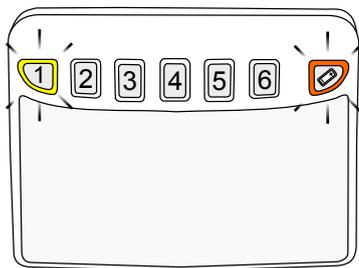
3.  Installieren Sie die Care Call Funk Sender entsprechend ihrer Bedienungsanleitungen.
Nehmen Sie den Pager aus dem Ladegerät und testen Sie alle Sender der Reihe nach.

Wir empfehlen dass der Pager volle 24 Stunden geladen wird, bevor unsere Geräte in Betrieb genommen werden. Im Notfall reichen auch einige Stunden im Ladegerät aus, um für eine kurze Dauer zu funktionieren, aber es wird nicht empfohlen.

4.  Um den Pager zurückzusetzen und die Vibration zu stoppen, halten Sie die Taste, die beleuchtet ist gedrückt.
Jedes Signal wird nach 20-40 Sekunden automatisch gestoppt.
Rauch- und Kohlenmonoxidmelder Signale werden 15 min lang gesendet um mit gegebenen Standards konform zu sein.

5.  Die Batterie Taste leuchtet alle 45 Sekunden grün auf um zu signalisieren, dass der Pager an ist.
Der Pager muss jede Nacht wieder aufgeladen und wenn er mehr als 24 Stunden nicht benutzt wird, ausgeschaltet werden.

6.  Wenn die Batterie leer wird zeigt der Pager das mit einem orangen Licht an der Batterie Taste an. Die Taste blinkt solange orange auf, bis der Pager geladen wird.

7.  Wenn das Batterie Symbol abwechselnd mit einem anderen Symbol aufleuchtet, hat das jeweilige Sendegerät eine schwache Batterie.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Die Reichweite des Systems erweitern

Es ist möglich den Pager anders einzustellen, wenn größere Areale abgedeckt werden müssen.

1.

Während der Pager ist eingeschaltet, bewegen Sie Kontrollschalter 5 nach links (weg von der Gürtelhalterung).

2.

Reichweite 500m

Das erweitert die Reichweite des Pagers von 100m (im Freien) auf 1000m (im Freien).

Vibrations Alarm

Man kann zwischen standardmäßigem Audio Alarm und diskreten Vibrationsmustern für jedes Ereignis wählen.

1.

Bewegen Sie den Schalter A nach links während der Pager an ist. (weg von der Gürtelhalterung).

2.

Der Pager vibriert nun, wenn ein Signal empfangen wird.

Das kann vor allem am Abend nützlich sein, wenn man den Pager quasi auf „lautlos“ stellt.

So wechseln Sie den Kanal

Anmerkung: In den meisten Fällen ist es nicht nötig den Kanal zu wechseln. Wenn allerdings ein oder mehrere weitere Care Call Systeme in der Nähe sind, ist es möglich den Kanal (bis zu 16 versch. Kanäle) zu wechseln um Störungen zu verhindern.

Der Pager hat den Kanal 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt.

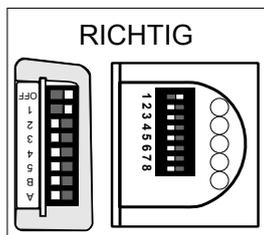
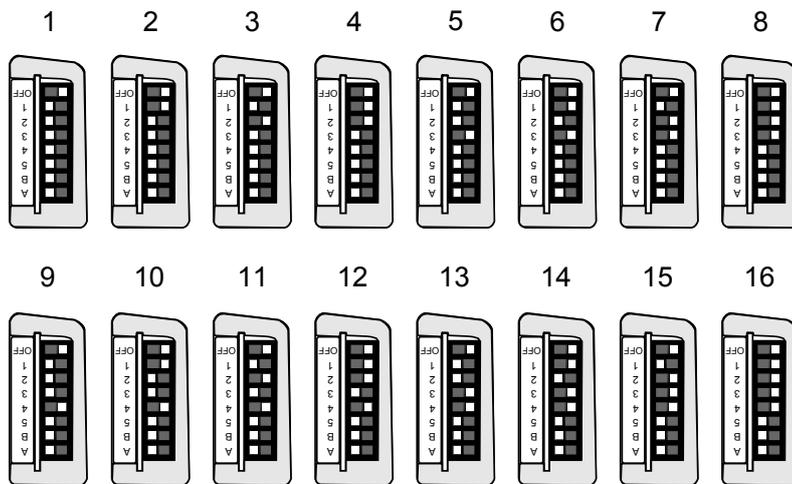
Falls Sie den Pager jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

Die Kanäle können mit den Schaltern 1-4 eingestellt werden.

Die Abbildung zeigt die 16 möglichen Kombinationen.

Stellen Sie sicher dass an allen Sendern des Systems der gleiche Kanal eingestellt ist.

Anmerkung: Care Call Empfänger haben An/Aus Schalter, die SA 3000 Sender aber nicht.



Hier haben wir einen Care Call Pager und Mini Sender auf Kanal 2 eingestellt.

Beim Einstellen der Kanäle müssen Sie dran denken den **An/ Aus** Schalter am Pager zu ignorieren, ansonsten sind die Geräte auf versch. Kanäle eingestellt.

Die Abbildung rechts zeigt einen falschen Einstellungsversuch des Kanals 2 (als Beispiel gezeigt um eventuelle Verwirrung zu vermeiden). Die richtige Einstellung sehen Sie links.

