


Schnellstart Anleitung CCS3A-2209-IN


Care Call SignWave Empfänger

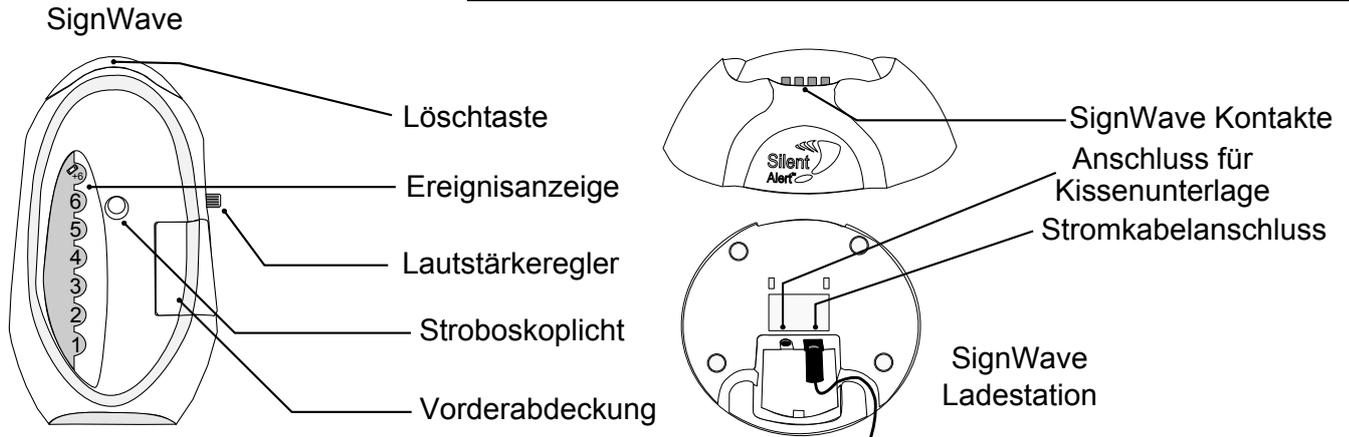

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007




1.

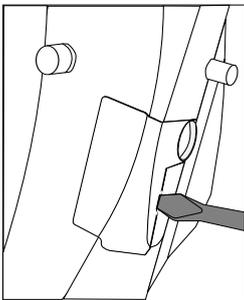

Schieben Sie einen flachen Schraubenzieher seitlich in die Ritze der Vorderabdeckung.

Üben Sie ein wenig Druck aus und der Deckel sollte nach außen schwenken.


2.

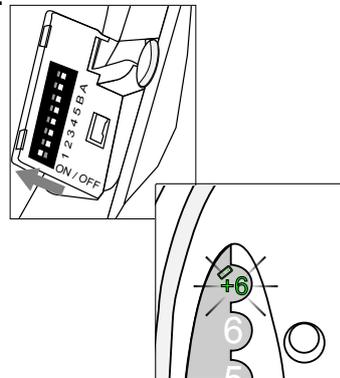

Bewegen Sie den An/Aus Schalter nach links mit Hilfe des Deckels der Vorderabdeckung.

Bringen Sie den Deckel wieder vorne an. Die Batterie Taste am SignWave blinkt nun grün alle 5 Sekunden um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.


3.

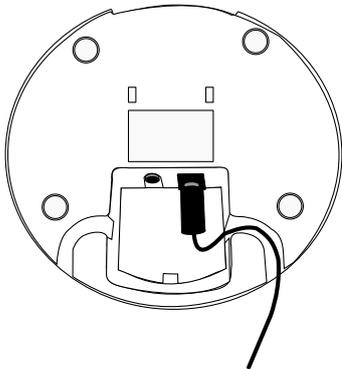

Stecken Sie das Stromkabel in das Gerät und den Stecker in die Steckdose.

Stellen Sie die Ladestation auf eine glatte Oberfläche wie z.B. einen Nachttisch oder Couchtisch.

4.

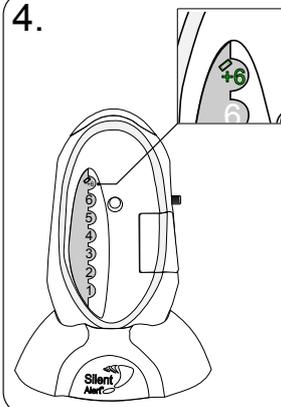


Stellen Sie den SignWave Empfänger in die Ladestation. Das Batterie Licht leuchtet nun konstant grün um anzuzeigen, dass das Gerät korrekt steht und geladen wird.

Wir empfehlen dass der SignWave volle 24 Stunden geladen wird, bevor unsere Geräte in Betrieb genommen werden. Der SignWave sollte jede Nacht in seine Ladestation gestellt werden um wieder aufgeladen zu werden & kann auch dort unbegrenzt stehen bleiben. Er kann dann von dort bei Bedarf weggenommen und benutzt werden.


Ein Signal Empfangen

Wenn ein Signal empfangen wird, blinkt das Stroboskoplicht, ein Alarmton wird abgegeben und die entsprechende Ereignistaste leuchtet auf. Um diese Abfolge zu stoppen, drücken Sie bitte die Löschtaste oben am Gerät. Wenn Sie die Löschtaste nicht drücken, wird die Abfolge weitere 20-30 Sekunden bestehen bleiben und sich dann automatisch abschalten. Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder Signale werden 15 min lang gesendet um mit gegebenen Standards konform zu sein. Um die Lautstärke zu erhöhen muss der Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn gedreht werden, um sie zu verringern gegen den Uhrzeigersinn.

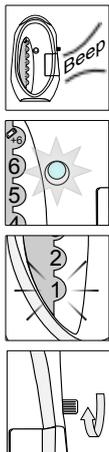

Niedriger Batteriestand

Wenn die Batterie im SignWave schwach wird, blinkt das Batteriesymbol orange auf.

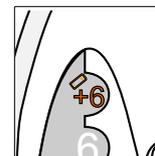

Das Gerät fängt an zu piepen, das Stroboskop Licht blinkt und das Batteriesymbol blinkt 4mal. Diese Abfolge wird 15 mal wiederholt bis der SignWave in die Ladestation gestellt wird.

Weiterführende Einstellungen CCS3A-2209-IN Care Call SignWave Empfänger



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Stroboskoplicht und Summer Optionen

Es ist möglich die Tonhöhe des Summers zu verändern und sowohl Summer als auch Stroboskoplicht können ausgeschaltet werden.



Um Veränderungen an Stroboskoplicht und Summer vorzunehmen, drücken und halten Sie die Löschentaste.

2. Nach ein paar Sekunden gibt der Summer den Alarmton ab, das Stroboskoplicht fängt an zu blinken und alle Ereignistasten leuchten, der Reihe nach von oben nach unten, auf.

Wichtig: Bitte halten Sie die Löschentaste weiterhin gedrückt.

3. Nun beginnt eine Reihe an Stroboskoplichtblitzen und Alarmtönen in Kombination mit den einzelnen Ereignistasten, die aufleuchten.


Lassen Sie die Löschentaste los, wenn die gewünschte Kombination angezeigt wird.

4. Stroboskoplicht und Summer Konfigurations Kombinationen sehen Sie hier:


- Telefon + Stroboskoplicht + Normalfrequenzton = Normalfrequenzton + Stroboskop (Standardmäßig)
- Türklingel + Stroboskoplicht + Hochfrequenzton = Hochfrequenzton + Stroboskoplicht
- Personensymbol + Normalfrequenzton = Normalfrequenzton, kein Stroboskoplicht
- Baby + Hochfrequenzton = Hochfrequenzton, kein Stroboskoplicht
- Einbruchssymbol + kein Ton + Stroboskoplicht = Kein Alarmton, Stroboskoplicht

Reichweite vergrößern

Es ist möglich die Reichweite des Systems zu vergrößern.

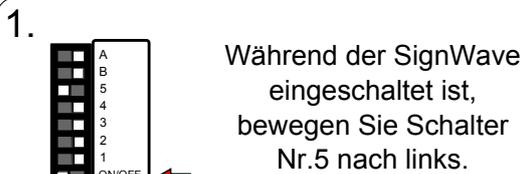

Während der SignWave eingeschaltet ist, bewegen Sie Schalter Nr.5 nach links.

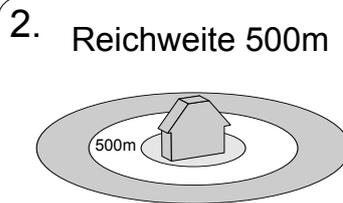

Reichweite 500m

Das erweitert die Reichweite des SignWaves von 100m (im Freien) auf 1000m (im Freien).

So wechseln Sie den Kanal



Anmerkung: In den meisten Fällen ist es nicht nötig den Kanal zu wechseln. Wenn allerdings ein oder mehrere weitere Care Call Systeme in der Nähe sind, ist es möglich den Kanal (bis zu 16 versch. Kanäle) zu wechseln um Störungen zu verhindern.

Der SignWave hat den Kanal 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt. Falls Sie den SignWave jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

Die Kanäle können mit den Schaltern 1-4 eingestellt werden. Die Abbildung zeigt die 16 möglichen Kombinationen.

Stellen Sie sicher dass an allen Sendern des Systems der gleiche Kanal eingestellt ist.

Anmerkung: Care Call Empfänger (SignWave und Pager) haben An/Aus Schalter, die SA 3000 Sender aber nicht.

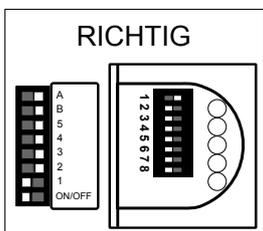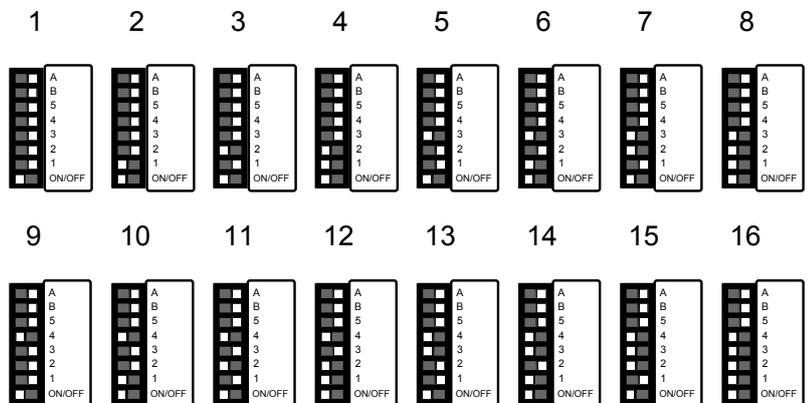

Hier haben wir einen Care Call SignWave und Mini Sender auf Kanal 2 eingestellt. Beim Einstellen der Kanäle müssen Sie dran denken den **An/Aus** Schalter am SignWave zu ignorieren, ansonsten sind die Geräte auf versch. Kanäle eingestellt. Die Abbildung rechts zeigt einen falschen Einstellungsversuch des Kanals 2 (als Beispiel gezeigt um eventuelle Verwirrung zu vermeiden). Die richtige Einstellung sehen Sie links.

