



Schnellstart Anleitung CH3A-2205-IN

Wecker / Pager Ladegerät

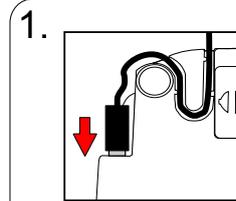


Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

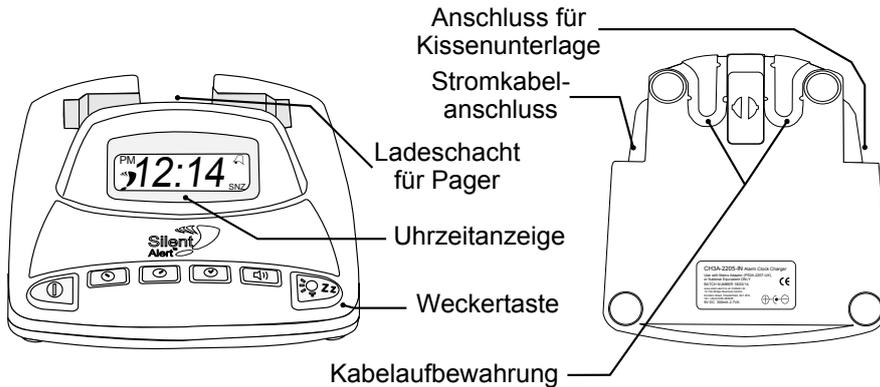


1. Stecken Sie das Stromkabel in das Gerät und den Stecker in die Steckdose ein.

Das Display schaltet sich ein wenn das Ladegerät eingesteckt ist. Nutzen Sie die Kabelaufbewahrung auf der Unterseite um das Kabel sicher anzubringen.

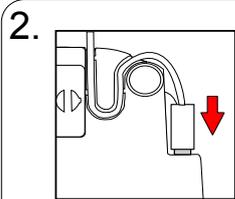

2. Nun muss die vibrierende Kissenunterlage angebracht werden, wenn sie verwendet wird. Nutzen Sie auch hier die Kabelaufbewahrung um das Kabel sicher anzubringen.

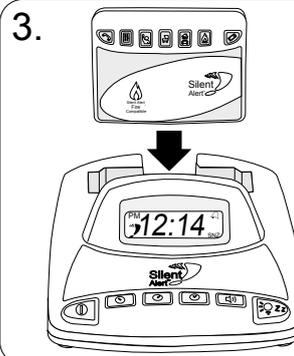

3. Stellen Sie den Pager in die Ladestation. Die Batterie Taste am Pager und die Snooze Taste am Ladegerät leuchten kurz grün auf um zu signalisieren, dass der Pager korrekt eingesetzt wurde. Wenn eine Kissenunterlage verwendet wird, vibriert diese nun 3mal, wenn der Pager eingesetzt wird.

Wir empfehlen dass der Pager volle 24 Stunden geladen wird, bevor unsere Geräte in Betrieb genommen werden. Im Notfall reichen auch einige Stunden im Ladegerät aus, um für eine kurze Dauer zu funktionieren, aber es wird nicht empfohlen.

Wecker Funktionstasten



Wecker An/Aus Stunde vorwärts Minute vorwärts Zeit einstellen Wecker einstellen Snooze


Die Zeit einstellen



Drücken und halten Sie die „Zeit einstellen“ Taste.



Benutzen Sie die „Stunde vorwärts“ und „Minute vorwärts“ Tasten um die korrekte Zeit einzustellen.

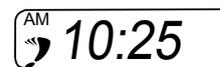

Lassen Sie die „Zeit einstellen“ Taste wieder los um die Zeit festzulegen.

Die Weckzeit einstellen



Drücken und halten Sie die „Wecker einstellen“ Taste.




Benutzen Sie die „Stunde vorwärts“ und „Minute vorwärts“ Tasten um die korrekte Zeit einzustellen.



Lassen Sie die „Alarm einstellen“ Taste wieder los um die Weckzeit festzulegen.

Den Wecker scharf stellen

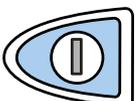

Drücken und halten Sie die „Wecker einstellen“ Taste.

Die Kissenunterlage vibriert 3mal wenn der Wecker eingeschaltet wird und ebenso leuchtet die Weck- und Snooze Taste auf.

Wenn die Kissenunterlage nicht angesteckt ist, piept das Ladegerät 3mal.

„Wecker gestellt“ Anzeige



Wenn der Wecker los geht piept das Ladegerät und die Kissenunterlage vibriert.



Um den Weckalarm zu deaktivieren drücken Sie die An/Aus Taste.

Um in 4 Minuten erneut geweckt zu werden drücken Sie die Snooze Taste.

