

Schnellstart Anleitung DDA Sets

Mini Sender zum Gebrauch mit Telecare Hausrufsystemen



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Die Schnellstart Anleitung erklärt wie man die Silent Alert Geräte mit bestimmten Telecare Hausrufsystemen unter Beachtung des DDA (Disability Discrimination Act) verbindet.


Da normalerweise ein Rauchmelder sein Signal an eine Rufzentrale absetzt, kann es sein, dass eine schwerhörige oder gehörlose Person den Alarm verpasst und so nicht auf die Gefahr aufmerksam gemacht wird.

Mit dem Silent Alert DDA Set wird der Benutzer sofort alarmiert und kann wenn nötig antworten oder reagieren. Es gewährleistet, dass schwerhörige und gehörlose Menschen durch integrierte Telecare Rauchmelder auf einen Alarm hingewiesen werden und falscher Alarm an die Notrufzentrale vermieden wird.


Der Benutzer hat durch das Telecare System weitere Vorteile wie z.B. Zugang zu Benachrichtigungen über Türklingel, Telefon, Babyfon und Türsprechanlagen, während er gleichzeitig die Sicherheit eines fernüberwachten Rauchmelders und eines Notfall Personenrufsenders genießen kann.

Diese Information soll nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers ersetzen. Um eine gute Leistung zu erzielen sollte ein Techniker eines Telecare Anbieters zu Rate gezogen werden.

Standard Betrieb

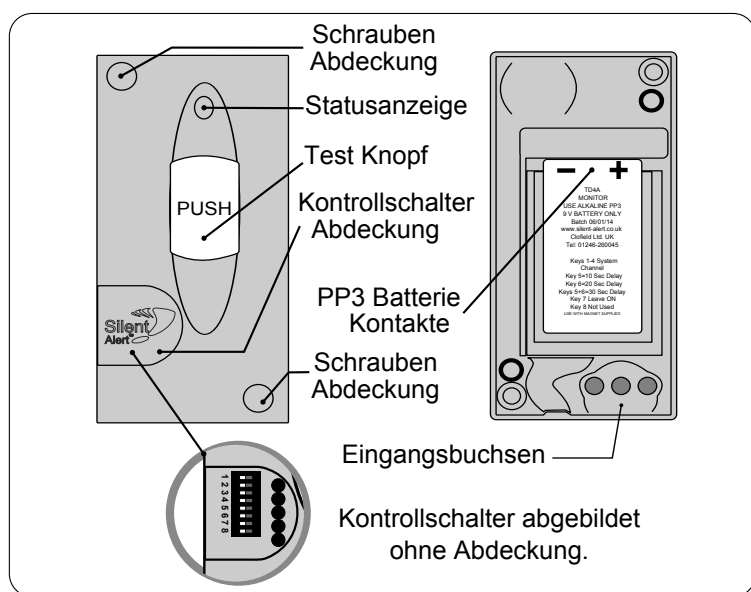

1. Legen Sie eine 9 Volt PP3 Alkali oder Lithium Batterie ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität.

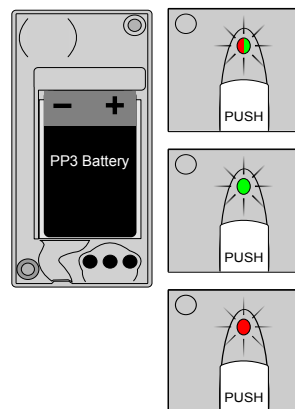

Wenn die Batterie zum ersten Mal eingesetzt wird, blinkt die Statusanzeige rot und dann einige Male grün.


Daraufhin wird die Anzeige sooft grün blinken, wie die vorhandene Batterie Volt hat.

9mal blinken = 9 Volt in der Batterie

Falls die Statusanzeige zu diesem Zeitpunkt rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie leer ist und ausgetauscht werden muss.

Um den Batterietest zu wiederholen, entfernen Sie die Batterie, drücken Sie den Test Knopf, dann legen Sie die Batterie wieder ein um die Abfolge noch einmal zu sehen.

2.

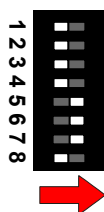


Bewegen Sie Kontrollschalter 5, 6 & 7 nach rechts.

3.

Der Sender löst nun aus, sobald das Telecare Hausrufsystem mit der externen Ausgabe beginnt.

Das Feuersymbol leuchtet am Pager oder SignWave Empfänger auf, wenn das Telecare Ausgabe Relais sich aktiviert.

4.




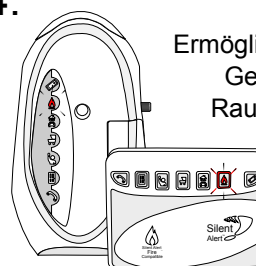


Ermöglicht es Schwerhörigen oder Gehörlosen auf Telecare Rauchmelder zu reagieren.

Der Sender kann verschiedene Symbole am Pager oder SignWave Empfänger zum Aufleuchten bringen.

Bewegen Sie den relevanten Schalter nach rechts.

Drücken Sie den Test Knopf und überprüfen Sie dass das richtige Ereignis vom Pager oder SignWave empfangen wurde.

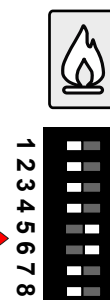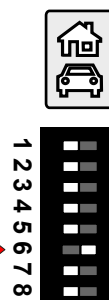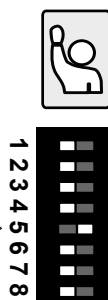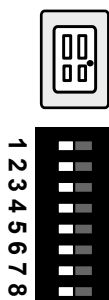

Für mehr Information wie der Mini Sender einzustellen ist, konsultieren Sie bitte die jedem Gerät beiliegende Schnellstart Anleitung. Wahlweise gibt es diese auch zum Herunterladen von unserer Website www.silentalert.ie

Schnellstart Anleitung DDA Sets

Silent Alert mit Chubb Careunity+ verbinden




Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Mit Chubb Careunity+ verbinden über das Modul FG158134 I/O

Die folgende Schnellstart Anleitung erklärt wie man das Silent Alert System mit Telecare Hausrufgeräten verbindet. Bitte konsultieren Sie immer zuerst die Installationsanweisung des Hausrufgeräts bevor Sie unser Gerät an das System anschließen.

Der Techniker der Telecare Anbieter sollte die Installationsanweisung des externen Alarms bzw. der Relais Kontrollschnittstelle FG158134 konsultieren.


1. Chubb FG158134

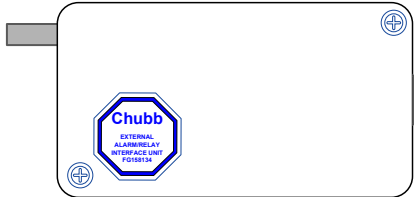

Stellen Sie sicher dass das Kontrollpanel vom Telecare Gerät getrennt ist, bevor Sie den Deckel abnehmen.


2.

Im Gerät befindet sich ein vierfacher Schraub Eingangsbuchsen Block.

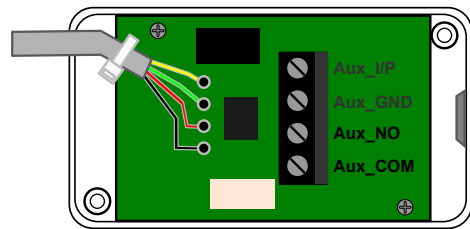


3.

Verbinden Sie eine geeignete Länge an 2-Leiterkabel mit Niederspannung mit den Eingangsbuchsen AUX_NO & Aux_COM (hier in grau und schwarz abgebildet).

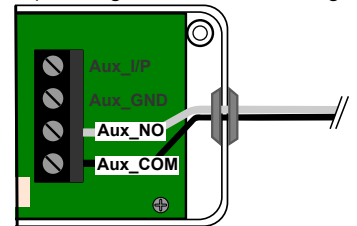

4.


Benutzen Sie den Kabelbinder zum sichern der Kabel, um zu verhindern, dass sie durch die Öse gezogen werden.

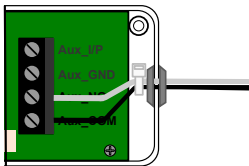

Sobald die Kabel installiert sind, setzen Sie den Deckel wieder auf das Kontrollpanel zurück.

5.



Verbinden Sie das freie Ende mit dem Mini Sender und befestigen Sie es mit den Schließschrauben.

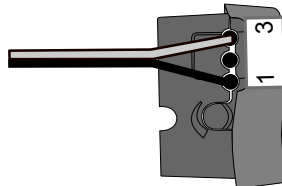

Vergewissern Sie sich dass der Hauptdraht (negativ) mit der Eingangsbuchse 1 am Mini Sender verbunden ist um falschen Alarm zu vermeiden.

6.

Bewegen Sie Kontrollschalter 7 am Mini Sender nach rechts. Das stellt den Sender so ein, dass er bei dieser Schaltung auslöst.

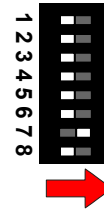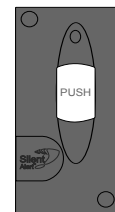

Der Sender löst nun immer dann den Pager oder SignWave Empfänger aus, wenn der Rauchmelder des Telecare Systems sich aktiviert.

EINSTELLUNG DES CARE UNITY +

Drücken Sie die Tasten Das Gerät erkennt den Programmierungsmodus und bestätigt dies mit 4 Tönen.

Drücken Sie diese Tastenabfolge, damit das Gerät bei Feueralarm auslöst (Hitze und Rauch).

Drücken Sie Tasten

Drücken Sie Tasten um aus dem Programmierungsmodus wieder heraus zu gehen. Das Gerät bestätigt das mit 2 Tönen.

Wahlweise kann auch folgendermaßen das Auslösen des Geräts eingestellt werden für alle Signale mit Bestätigungston.

Drücken Sie Tasten

Drücken Sie Tasten um aus dem Programmierungsmodus wieder heraus zu gehen. Das Gerät bestätigt das mit 2 Tönen.

WARNUNG

Verbinden Sie die Geräte nur in der Weise wie abgebildet. Silent Alert International übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch falsche Installation hervorgerufen wurden.

Schnellstart Anleitung DDA Sets

Silent Alert mit Tunstall Lifeline Vi+ verbinden




Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Mit Tunstall Lifeline Vi+ verbinden

Die folgende Schnellstart Anleitung erklärt wie man das Silent Alert System mit Telecare Hausrufergeräten verbindet. Bitte konsultieren Sie immer zuerst die Installationsanweisung des Hausrufergeräts bevor Sie unser Gerät an das System anschließen.

Der Techniker der Telecare Anbieter sollte Seite 40 der Installations- und Programmierungsanweisung konsultieren.

1. Verbinden Sie ein Telefon mit dem Symbol am Heimerät.
- Um in den Programmierungsmodus zu gelangen drücken und halten Sie die grüne Löschen Taste bis es piept (etwa 5 Sek). Das Heimerät kündigt den Programmierungsmodus an und der rote Alarm Knopf blinkt langsam.

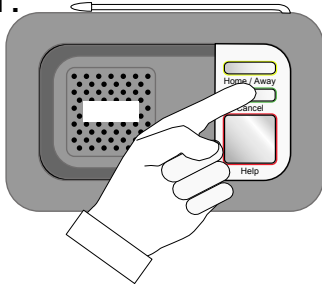

2. Nehmen Sie den Hörer des Telefons ab und geben Sie den nötigen Schnellcode ein.

Für die Benutzung von Silent Alert Geräten benutzen Sie Kode


3013

Das aktiviert den Mini Sender, wenn der Telecare Rauchmelder sich einschaltet und informiert den Benutzer über den Pager oder SignWave Empfänger.


3. Zusätzliche Einstellungen
- Anmerkung:** Wir empfehlen für die Benutzung der Silent Alert Geräte Kode **3013** um ein bestmöglichstes Resultat zu erhalten.

3011	Aktiviert das externe Relais für 2 Sekunden	Alle Sender und Melder (Signal ausgelöst)
3012	Aktiviert das externe Relais für alle Sender und Melder wenn ein Signal ausgelöst wird und deaktiviert es, wenn das Signal gelöscht wird	Signal ausgelöst Signal gelöscht
3013	Aktiviert das externe Relais am Rauchmelder wenn ein Signal ausgelöst wird und deaktiviert es, wenn das Signal gelöscht wird	Rauchmelder Signal ausgelöst Signal gelöscht
3014	Deaktiviert das externe Relais für alle Ereignisse	

4. Die Ausgangsbuchse an Vi+ Hausrufergeräten stellt Anschlüsse für allgemeine (COM – Common), normalerweise geschlossene (NC – normally closed) und normalerweise geöffnete (NO-normally open) Kontakte bereit.

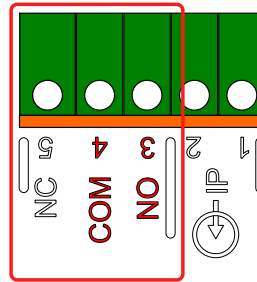


5. Bewegen Sie am Sender Kontrollschalter 7 nach rechts.

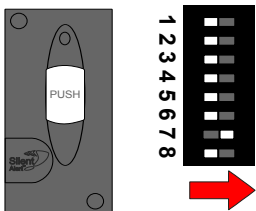

Das stellt die Auslöse Umgehung am Sender ein.

6. Verbinden Sie eine geeignete Länge an 2 –Leiterkabel mit Niederspannung mit den Eingangsbuchsen 3 & 4 am Tunstall Gerät (hier in grau und schwarz abgebildet).
- Verbinden Sie das freie Ende mit Eingangsbuchsen 1 & 3 am Silent Alert Mini Sender.
- Vergewissern Sie sich dass der Hauptdraht (negativ) am Türklingelknopf mit der Eingangsbuchse 1 am Mini Sender verbunden ist, um falschen Alarm zu vermeiden. Stellen Sie die Sicherungsschrauben fest.

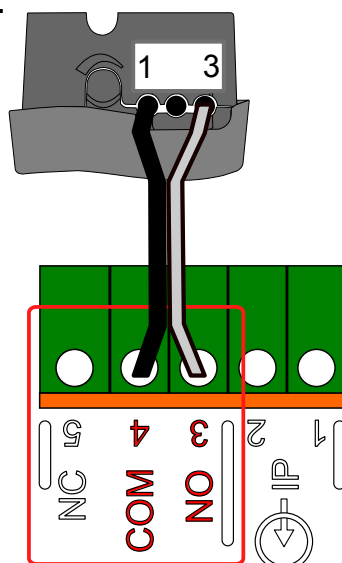

7. Der Sender wird nun jedes Mal ein Signal an den Pager oder SignWave senden, wenn der Telecare Rauchmelder sich aktiviert.

WARNUNG

Verbinden Sie die Geräte nur in der Weise wie abgebildet. Silent Alert International übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch falsche Installation hervorgerufen wurden.

Schnellstart Anleitung DDA Sets

Silent Alert mit Tynetec reach+ verbinden




Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Mit Tynetec reach+ verbinden über das Modul Tynetec ZSA556A I/O

Die folgende Schnellstart Anleitung erklärt wie man das Silent Alert System mit Telecare Hausrufgeräten verbindet. Bitte konsultieren Sie immer zuerst die Installationsanweisung des Hausrufgeräts bevor Sie unser Gerät an das System anschließen. Der Techniker des Telecare Anbieters sollte Seite 27 der reach+ Installationsanweisung des ZSA556A Moduls für Informationen rund um das Kontrollpanel konsultieren.


1.

Tynetec ZSA556A

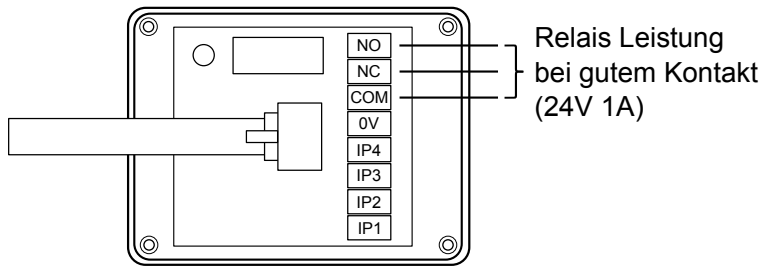

2.


Verbinden Sie eine geeignete Länge an 2 –Leiterkabel mit Niederspannung mit den Eingangsbuchsen NO & COM am Tynetec Gerät (hier in grau und schwarz abgebildet).

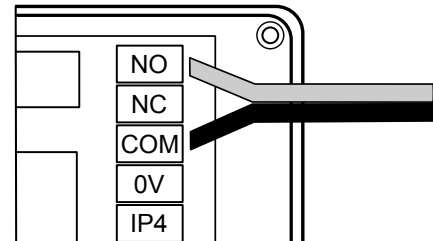

3.

Vergewissern Sie sich dass die Kabel korrekt und sicher angebracht sind und drücken Sie den Deckel zurück an die Box.



4. Verbinden Sie das freie Ende mit dem Mini Sender und sichern Sie es mit den Schließschrauben.

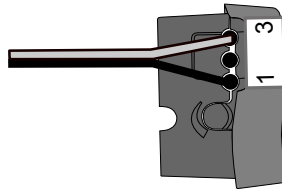

Vergewissern Sie sich, dass der Hauptdraht (negativ) mit der Eingangsbuchse 1 am Mini Sender verbunden ist, um falschen Alarm zu vermeiden.

5.

Bewegen Sie Kontrollschalter 7 am Mini Sender nach rechts. Das stellt den Sender so ein, dass er bei dieser Umgehung auslöst.

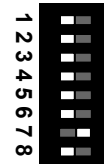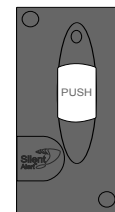

Der Sender löst nun immer dann den Pager oder SignWave Empfänger aus, wenn der Rauchmelder des Telecare Systems sich aktiviert.

Einstellung des:

Das Tynetec reach plus lässt sich über eine Tastatur hinten am Gerät einstellen.

Geben Sie ein **# 1 1 7** Das Gerät sagt an : „Hardwired Output DTMF tone“.

Geben Sie zwei Zahlen als DTMF Töne ein (00 bis 15) und das Gerät sagt an: „Duration“.

Geben Sie **0 3** ein, um den Tynetec DTMF Ton 03 auszuwählen.

Geben Sie zwei Zahlen für die Zeit in Sekunden ein (00 bis 99), die Sie wünschen, dass das Relay eingeklinkt bleibt und nachfolgend #.

Geben Sie ein **0 1 #**

WARNUNG

Verbinden Sie die Geräte nur in der Weise wie abgebildet. Silent Alert International übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch falsche Installation hervorgerufen wurden.